

Hydriade

Réduisez vos étapes de stérilisation !



L'Hydriade est le premier dispositif automatique pour la préparation à la stérilisation.

Adapté à toutes les spécialités, l'Hydriade 4en1 accomplit les principales étapes de pré-stérilisation:

- **Désinfection**
- **Lavage à ultrasons**
- **Rinçage**
- **Séchage**

Choisissez parmi 3 cycles préprogrammés d'une durée de 5 à 20 min (phases de nettoyage).

Les paramètres des cycles préprogrammés peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques d'utilisation.

Utilisation d'un détergent spécifique adapté pour nettoyer, désinfecter et protéger l'instrumentation



Chauffage :
L'appareil procède au chauffage et à première décontamination statique des instruments.



Dégazage :
Ce processus élimine les gaz dissouts dans l'eau afin d'éviter toute interférence avec les ultrasons et d'améliorer l'efficacité du processus.



Nettoyage par ultrasons :
La cavitation permet d'éliminer les résidus chimiques et organiques du matériel plongé dans le bac. La charge bactérienne est ainsi éliminée à plus de 95%.



Evacuation :
Hydriade vidange automatiquement tous les liquides contenus dans la cuve.



Rinçage à ultrasons :
Hydriade procède au rinçage par injection d'eau sous pression à travers les buses situées dans le couvercle. Vidange automatique de l'eau injectée.



Séchage :
La combinaison d'un ventilateur et d'une résistance engendre un jet d'air chaud pour éliminer l'humidité sous forme de vapeur.